




## 前 QR 轴长度调节

出于安全原因，请确保正确调整！

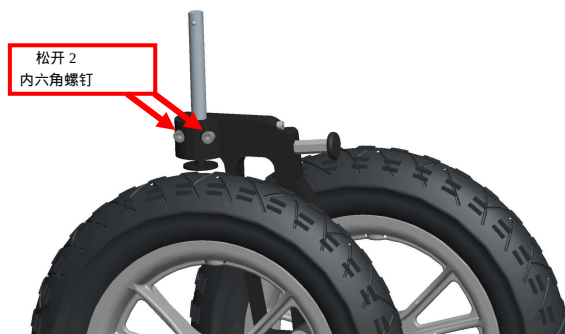

1. 松开 2 个内六角螺钉，并将 QR 轴向下推过叉子，直到看到大轴螺母。



2. 使用 11 毫米和 19 毫米扳手调整快拆轴的长度。用 11 毫米扳手握住快拆轴的末端，防止其旋转。用 19 毫米扳手调整螺母。如果快拆轴无法锁入车架，则逆时针旋转螺母  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  圈即可。
3. 再次拧紧前叉上的两颗螺丝，将快拆轴固定在前叉上，然后尝试将前悬架安装到车架上。确认其已完全锁定到位。

如有任何疑问，请致电我们的客户支持：+46-8-522 100 50