




## Veloped 拐杖托——组装指南

Soporte de bastón de 2 piezas para el Veloped que también funciona como una correa de seguridad cuando el Veloped se pliega y es fácil de guardar y transportar. El soporte del bastón se adapta a todos los modelos de Veloped.

使用您的智能手机或设备扫描二维码即可查看视频说明。

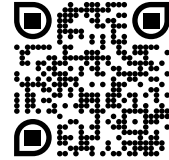

### ① 安装后支架。

将后方的拐杖托部件缠绕在后方的垂直框架管上部，紧靠高度调节快速释放装置下方。



### ② 拉紧带子。

拉紧带子，将其缠绕在管子上，并用魔术贴固定。让带子长出的部分自由悬垂。



### ③ 调整后环。

放松魔术贴，可调节后圈尺寸。您可能需要轻柔挤压才能得到圆形/环形。



#### ④ 安装前支架。

将前方的拐杖托部件绑在 Veloped 前方的框架管上部，紧靠篮子围栏的下方。请确保防滑片向着框架管。



#### ⑤ 调整前环。

放松魔术贴，可调节前圈尺寸。您可能需要轻柔挤压才能得到圆形/环形。



#### ⑥ 安装手杖。

将手杖从后方推入，先穿过后托，再穿过前托，从而固定好手杖。



#### ⑦ 固定框架。

运输或储存 Veloped 时，您可以在 Veloped 折叠状态下使用拐杖托的带子固定框架。