



手册：Trionic 缆锁



① 找到支架上的螺丝。



② 使用 4 毫米内六角扳手拧下螺丝。



③ 将带子的末端从支架中拉出。



④ 将带子缠绕在 Veloped 后垂直车架管上（在 Walker 助行车上，为半垂直车架管）。



⑤ 将带子的末端插入支架。



⑥ 使用 4 毫米内六角扳手拧紧螺丝/带子，直到带子绷紧为止。



⑦ 使用电缆剪或刀剪掉带子多余的长度。



⑧ 照片显示了支架的正确安装。



⑨ 将缆锁从上方安装到支架上，向下推缆锁，直至其卡入支架。



⑩ 要将缆锁从支架上拆下，请按下两个灰色按钮，然后将锁从支架上取下。