



Veloped 助行车运输袋用户指南


Veloped 助行车运输包包含一个用于放置 Veloped 助行车车架的主包，以及两个分别用于放置前轮和后轮的小包。此款运输包适用于所有 Veloped 助行车型号。

适合所有 Veloped 型号。



① 打开主袋。

拉开储物袋（兼作前轮袋）的拉链，取出主运输袋和后轮袋。

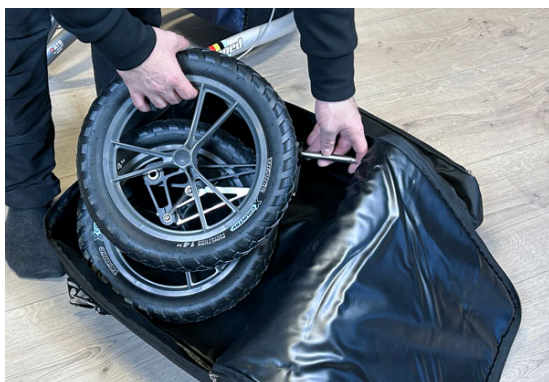

② 打包前轮。

将前攀爬轮从 Veloped 车架上拆下，然后装入更大的轮袋中并拉上拉链。




③ 打包后轮。

将两个后轮从 Veloped 车架上拆下，然后将其装入较小的轮袋中并拉上拉链。



④ 展开主袋

将主包的拉链拉开，然后将包展开放在地板上。将车架放在主包的中央部分，将较大的前轮包放在 Veloped 的座位下（两个后垂直车架管之间）。

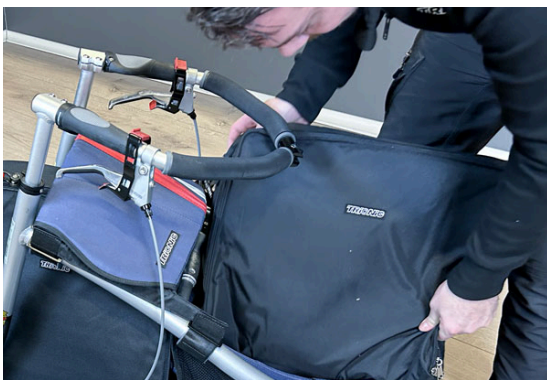

⑤ 添加轮袋。

松开高度调节快速释放杆并稍微抬起握把杆，将较小的后轮袋放置在 Veloped 篮子的顶部，然后将握把杆放低至其底部位置。




⑥ 关闭袋子。

将主包的“盖板”拉到 Veloped 上并拉上拉链。



⑦ 这张照片显示了 Veloped 的正确包装状态。

包装说明

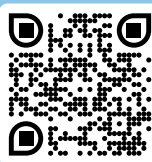

使用您的智能手机或设备扫描二维码即可查看视频说明。