




助行器手杖架 – 组装说明

两件式手杖固定器，可固定在助行器手柄和框架上。上部配备智能快速锁定功能，可快速安装和拆卸手杖。适用于 Walker 9er、12er 和 14er 助行器。

使用您的智能手机或设备扫描二维码即可查看视频说明。

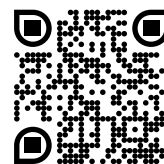

① 转动上部支架，使标识朝上。



② 将支架卡入手柄管的上部。

将支架卡入手柄管的上部，然后用十字螺丝刀将其拧紧到位。



③ 如果你同时安装手杖架和靠背

注意：调整刹车杆的位置，确保靠近靠背的上部手杖架有足够的空间。可能需要将手杖架向外倾斜约 30 度，以便将手杖架和靠背固定在助行器上。




④ 将下部支架安装到框架上

如需左右侧组装，请旋转下部支架，以便从车架外侧够到螺丝。要将下部支架安装到车架上，请将绑带绕过车架管，然后将其推入支架孔中。



⑤ 拧紧螺丝/带子

使用 4 毫米内六角扳手拧紧螺丝/带子。

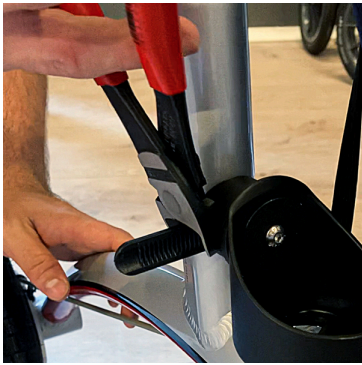

⑥ 剪掉表带多余的长度

使用电缆剪剪掉带子多余的长度。



⑦ 准备使用