



Trionic Walker助行车座椅靠背 - 组装说明



具有人体工程学效果的软垫靠背是采用防水和结实耐用的 600D 涤纶制成，可适合 Walker 9er、12er 和 14er 助行车。当您坐下时其可向您提供舒适和安全的支持。

座椅靠背的长度/深度是可以调节的。

① 旋鬆。

从两个夹具上卸下螺丝和螺母。

② 安装靠背。

稍微打开夹具，将其附着在握把套管上。**重要提示：**确保“TRIONIC”标识符的位置正确，因为靠背是倾斜的。



③ 一路向上。

把两个夹具推到最顶端。您可能需要松开刹车握把上的螺丝，以便使它向后移动一点。





④ 固定靠背。

使用4毫米的艾伦内六角扳手，用螺丝和螺母把两个夹具固定。在连接点处座椅靠背的背带应指向前方。

⑤ 这张照片说明了正确的组装方法。



在展开助行器之前。

要折叠助行车，应将座椅靠背向上倾斜。

如果有必要的话。

如果您发现座椅靠背太短/太长，您可以对其长度进行调节。卸下两个螺丝和螺母，然后再次组装座椅靠背。

