



沃克运输袋 – 包装说明

Walker 助行车便携包由一个主便携包和一个较小的储物/携带包组成。此便携包适用于所有 Walker 助行车型号。

适合所有 Trionic Walker 型号。




① 打开主袋

打开储物袋拉链，取出主运输袋。



② 展开主袋。

将主袋的拉链全部拉开，然后将袋子的盖板展开放在地板上。

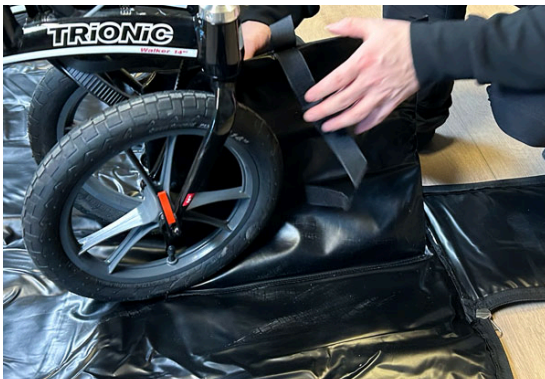


③ 将助行器放在袋子上。

将 Walker 放在主运输袋的中央部分。主袋有一个集成的带衬垫的保护盖，带有 Velcro 带。将带衬垫的保护盖向上拉，并将其放在前轮叉之间，以保护油漆。



④ 使用集成的 Velcro 带固定折叠框架。

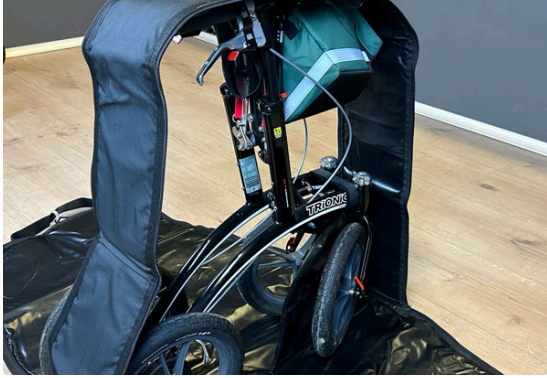

⑤ 将中心翻盖折叠到 Walker 上。




⑥ 提起侧翼并拉上主拉链。



⑦ 这张照片显示 Walker 的包装正确。

包装说明

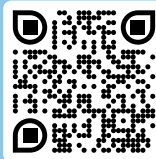

使用您的智能手机或设备扫描二维码
即可查看视频说明。